

UJI OBAT-OBAT NAPZA DAN PSIKOTROPIKA

Penyalahgunaan narkoba semakin marak dan memberikan dampak buruk pada penggunanya. Adanya riwayat penggunaan narkoba dapat dideteksi dengan alat Uji Napza pada urine. Hasil ini akan positif hingga 3-5 hari setelah penggunaannya. PT Pakar Biomedika Indonesia memproduksi alat uji untuk identifikasi adanya penggunaan beberapa jenis narkoba, dengan kualitas alat yang baik dan penggunaan yang mudah serta cepat. Dalam waktu 5 menit akan dapat diketahui apakah orang tersebut mengonsumsi zat narkoba atau tidak.

UJI NAPZA COMBO 3 (MOR, THC, AMP)

No. Katalog: AUC-068D09

Menggabungkan kemampuan untuk mendeteksi **3 jenis NAPZA** sekaligus pada urine seseorang pengguna napza. Kombinasi ketiga jenis narkoba tersebut, yaitu Morfin, Mariyuana, dan Amfetamin.



UJI MORFIN

Obat-obatan golongan opiat (contoh morfin atau heroin) dapat dideteksi dalam urine dengan alat UJI MORFIN hingga kadarnya 300 ng/mL.

Dengan Kesetaraan Setinggi 92,5%



Narkotika Alami

UJI MARIYUANA

Bahan aktif mariyuana adalah THC (tetrahidrokanabinol) yang dieksresikan dalam urine sebagai Δ^9 -THC-COOH. Alat uji ini mampu mendeteksi penggunaan mariyuana jika kadarnya dalam urine mencapai 50ng/mL.

Dengan Kesetaraan Setinggi 100%

UJI AMFETAMIN


Amfetamin merupakan golongan agen sympathomimetic kuat yang digunakan untuk terapi pengobatan. Alat ini mampu mendeteksi kadar amfetamin dalam urine ≥ 1000 ng/mL

Dengan Kesetaraan Setinggi 100%

CARA PENGGUNAAN

UJI NAPZA COMBO 3


Sebelum pengujian dilakukan, alat UJI NAPZA COMBO 3, spesimen urin, dan/atau spesimen kontrol harus berada dalam kondisi suhu ruang (15-30°C).

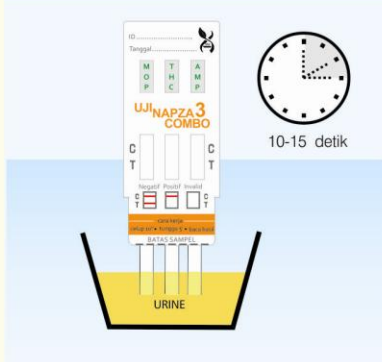

1. Keluarkan alat uji dari sachetnya dan buka penutup pada bagian ujung alat uji. Perhatikan tanda panah dan celupkan ke dalam spesimen urin selama 10-15 detik. Jangan dicelupkan melewati batas tanda panah.



2. Tempatkan alat uji pada permukaan datar yang tidak bersifat menyerap cairan, mulailah menghitung waktu pengujian dan tunggu hingga muncul garis berwarna merah pada daerah membran pengujian. Hasil dibaca pada menit ke-5. Jangan membaca hasil setelah 10 menit.

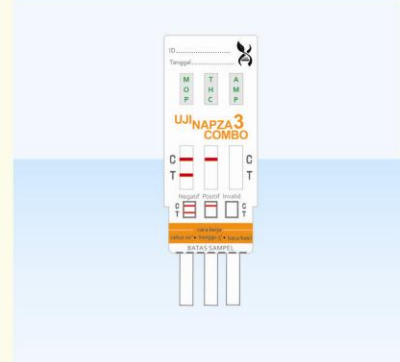

3. Pembacaan hasil berupa garis berwarna merah-ungu dengan arti pada posisi C dan T : Negatif
pada Posisi C : Positif
Garis C tidak muncul : Invalid



Kemasan : Tiap alat uji dikemas dalam box @ 10 sachet

* Memiliki Sertifikat TKDN

* Terdaftar di Kementerian Kesehatan RI



www.pakarbiomedika.com

DISTRIBUTOR: